

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H

TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO IL PRESENTE FOGLIETTO ILLUSTRATIVO E LEGGERLO ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO. QUALORA SI FOSSE VERIFICATO O SI SAREBBE POTUTO VERIFICARE UN INCIDENTE GRAVE CORRELATO AL DISPOSITIVO, SI PREGA DI SEGNALARLO DIRETTAMENTE AL FABBRICANTE O, TRAMITE IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO, ALL'AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE LOCALE.

DESTINAZIONE D'USO

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H è una soluzione di lavaggio da utilizzare con i dispositivi HA-8180V o HA-8180T utilizzati per la determinazione quantitativa dell'HbA1c e dell'HbA2. Da utilizzarsi esclusivamente per la diagnostica *in vitro* e solo in ambiente professionale.

RIEPILOGO E PRINCIPI OPERATIVI

La misurazione dell'HbA1c stabile è di grande utilità nella diagnosi e nella terapia del diabete e per mantenere sotto osservazione le patologie correlate. I dispositivi HA-8180V e HA-8180T determinano l'HbA1c nel sangue mediante cromatografia a scambio cationico in fase inversa. Il campione di sangue diluito con la soluzione lavaggio emolisi viene inviato alla colonna, dove viene frazionato nei diversi componenti dell'emoglobina mediante cromatografia liquida ad alta efficienza (HPLC, High Performance Liquid Chromatography).

AVVERTENZE

- Questo prodotto contiene sodio azide (NaN₃) in quantità inferiore allo 0,02%; tale sostanza conservante può causare irritazioni alle mucose.
- La sodio azide può reagire a contatto con il rame o il piombo, generando azidi metalliche potenzialmente esplosive.
- La sodio azide può inoltre reagire a contatto con gli acidi dando origine a idrogeno azide, una sostanza tossica ed esplosiva.
- Di conseguenza, per lo smaltimento di questi materiali è necessario diluirli in un volume di acqua adeguato, al fine di prevenire il deposito di residui di reagente nelle tubazioni di servizio dell'acqua.
- Se il prodotto dovesse venire a contatto con gli occhi o con la bocca, lavare immediatamente con abbondante acqua corrente e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua corrente.
- Smaltire i liquidi di scarico contenenti campioni di sangue secondo quanto previsto dalla normativa locale in materia di rifiuti sanitari pericolosi.

PRECAUZIONI

- Da utilizzarsi esclusivamente per la diagnostica *in vitro*.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo con i dispositivi HA-8180V o HA-8180T. NON utilizzare con altri strumenti. Consultare il manuale operativo dello strumento.
- Se il prodotto viene conservato al fresco, ad esempio in frigorifero, prima di inserirlo nello strumento attendere per almeno un'ora che si adatti all'ambiente dello stesso.
- NON utilizzare il flacone della soluzione lavaggio emolisi dopo la data di scadenza indicata.
- La data di scadenza è indicata sia sulla confezione sia sull'etichetta del flacone.
- Collocare il flacone della soluzione lavaggio emolisi nel vassoio flaconi, nella posizione specificata, quindi fissare opportunamente il tappo del flacone con sonda per la soluzione lavaggio emolisi.
- Sostituire la confezione di soluzione lavaggio emolisi con una nuova anche se la vecchia confezione contiene una piccola quantità residua di soluzione.
- L'aggiunta di soluzione fresca nella vecchia confezione può determinare risultati di analisi errati.
- Maneggiare sempre con cura il prodotto.
- Non sottoporre a urti violenti.

PROCEDURA DI ANALISI

Fare riferimento al manuale operativo dello strumento.

CONSERVAZIONE

- Conservare i flaconi di soluzione lavaggio emolisi sigillati a una temperatura compresa fra 3 °C e 30 °C, lontano dalla luce diretta del sole.
- Una volta aperta la confezione, utilizzare la soluzione lavaggio emolisi entro un mese dall'apertura anche in presenza di una data di scadenza successiva.
- Qualora lo strumento debba rimanere inutilizzato per una settimana o più, rimuovere il flacone di soluzione lavaggio emolisi dallo strumento. Quindi, chiudere bene e conservare a una temperatura compresa fra 3 °C e 30 °C, in modo da prevenire il deterioramento e/o la concentrazione dei liquidi.

MATERIALI IN DOTAZIONE

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H: 3 flaconi da 2 L per scatola, tampone fosfato contenente tensioattivi.

Materiali del flacone:

flacone in polietilene (PE) con tappo in polipropilene (PP)

MATERIALI NECESSARI NON IN DOTAZIONE

Fare riferimento al manuale operativo dello strumento.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Fare riferimento al manuale operativo dello strumento.

CONTROLLO QUALITÀ

Fare riferimento al manuale operativo dello strumento.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contatto per l'assistenza tecnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

