

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H

MANTENHA ESTE FOLHETO SEMPRE À MÃO E LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR. SE SOFREU OU ESTEVE PERTO DE SOFRER UM INCIDENTE GRAVE RELACIONADO COM O DISPOSITIVO, COMUNIQUE A SITUAÇÃO DIRETAMENTE AO FABRICANTE OU AO REPRESENTANTE AUTORIZADO E À AUTORIDADE REGULADORA LOCAL.

FINALIDADE PREVISTA

A HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H é uma solução de lavagem para uso com HA-8180V ou HA-8180T, que são destinadas à medição quantitativa de HbA1c e HbA2. Apenas para uso no diagnóstico *in vitro* e uso profissional.

RESUMO E PRINCÍPIO

A medição da HbA1c estável é muito útil no diagnóstico e tratamento da diabetes e no acompanhamento das condições diabéticas. O HA-8180V e HA-8180T medem a HbA1c no sangue utilizando a cromatografia de troca de cátions de fase reversa. A amostra de sangue diluída com a solução de lavagem de hemólise é enviada para a coluna, que fraciona a amostra nos diversos componentes da hemoglobina com base na cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).

ADVERTÊNCIAS

- Este produto contém menos de 0,02% de azida sódica (NaN3) irritativa da mucosa como conservante.
- A azida sódica pode reagir com o cobre ou com o chumbo, podendo gerar azida metálica explosiva.
- A azida sódica pode também reagir com ácido, dando origem à criação de azida de hidrogénio explosiva tóxica.
- Por conseguinte, quando estes materiais forem eliminados, devem ser misturados com um volume adequado de água para evitar a permanência residual de reagentes na canalização.
- Se este produto entrar em contacto com os olhos ou a boca, lave de imediato com água abundante e consulte um médico.
- Se entrar em contacto com a pele, lave com água abundante.
- Elimine os resíduos líquidos que contenham amostras de sangue segundo as normas locais sobre resíduos biologicamente perigosos.

PRECAUÇÕES

- Apenas para uso no diagnóstico *in vitro*.
- Este produto destina-se apenas à HA-8180V ou HA-8180T. NÃO tente utilizá-lo com outros instrumentos. Consulte o manual de instruções do instrumento.
- Se este produto for conservado num local frio, como um frigorífico, deixe que atinja a mesma temperatura ambiente que o instrumento durante, pelo menos, uma hora antes de o colocar no instrumento.
- NÃO utilize o frasco de solução de lavagem de hemólise para além do seu prazo de validade.
- O prazo de validade está indicado tanto na caixa como no rótulo do frasco.
- Coloque o frasco de solução de lavagem de hemólise na posição indicada no tabuleiro dos frascos e fixe corretamente a tampa do frasco com injetor para a solução de lavagem de hemólise.
- Substitua o frasco de solução de lavagem de hemólise por um novo, mesmo que o frasco antigo ainda tenha uma pequena quantidade de solução.
- Adicionar solução nova ao frasco antigo pode causar resultados de medição imprecisos.
- Tenha sempre cuidado ao manusear este produto.
- Evite embates físicos.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Consulte o manual de instruções do instrumento.

ARMAZENAMENTO

- Armazene os frascos de solução de lavagem de hemólise por abrir a uma temperatura entre 3°C e 30°C, evitando a luz direta do sol.
- Depois de aberto o frasco, utilize a solução de lavagem da hemólise no espaço de um mês, mesmo que tal seja antes do prazo de validade.
- Se o instrumento não for utilizado durante uma semana ou mais, retire o frasco de solução de lavagem de hemólise do instrumento. Depois, feche-os bem e armazene-os a uma temperatura entre 3°C e 30°C para evitar a degradação e/ou concentração do líquido.

MATERIAIS FORNECIDOS

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H: 3 L x 2 frascos/caixa, tampão de fosfato com surfactante.

Materiais do frasco:

Frasco de polietileno (PE) com tampa de polipropileno (PP)

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS

Consulte o manual de instruções do instrumento.

COLHEITA E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS

Consulte o manual de instruções do instrumento.

CONTROLO DE QUALIDADE

Consulte o manual de instruções do instrumento.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contacto para assistência técnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

