

DILUENT 90

A JELEN DOKUMENTUMOT MINDIG TARTSA ELÉRHETŐ HELYEN, ÉS HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT. A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN BEKÖVETKEZETT VAGY POTENCIÁLIS SÚLYOS ESEMÉNYEKET JELENTENI KELL KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓNAK VAGY A HIVATALOS KÉPVISELŐN KERESZTÜL, VALAMINT A HELYI SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGNAK.

RENDELTTETÉS

A DILUENT 90 rendeltetése a kereskedelembe kapható kontrollanyagok hígítása a HA-8190V készüléken történő feldolgozáshoz a HbA1c mennyiségi mérésére. A DILUENT 90 teljesvérminták hígítására is használható. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai és professzionális használatra.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ha a DILUENT 90 szembe vagy szájba kerül, azonnal mossa le bő vízzel, és kérjen orvosi tanácsot.
- Ha bőrre kerül, mossa le bő vízzel.
- A vérmintát tartalmazó folyékony hulladékot a bioveszélyes hulladéokra vonatkozó helyi előírások szerint kezelje.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Kizárólag *in vitro* diagnosztikai használatra.
- A termék csak HA-8190V készülékkel használható. NE használja más készülékkel. Lásd a készülék kezelői kézikönyvét.
- NE használja a készletet a lejárat dátum után.
- A lejárat dátumot megtalálja mind a dobozon, mind a palack címkéjén.
- A felnyitott palackot 2°C–8°C-os hőmérsékleten tárolja, hogy ne szaporodjanak el benne a kórokozók.
- Használat előtt olvassa el a kereskedelembe kapható kontrollok használati útmutatóját.
- A palack felnyitása után kerülje a reagentsek keveredését.
- NE használja az előkészített kontrollt, ha zavarosságot vagy idegen anyagot lát benne.
- A hígított teljesvérmintát és a kontrollt 2°C–8°C-os hőmérsékleten tárolja, és 8 órán belül használja fel. Ha 8 óránál később használja, pontatlan mérési eredmények keletkezhetnek.

ELJÁRÁS

Teljesvérminták (hemolizált minták előkészítése)

- Adjon megfelelő mennyiségű DILUENT 90 oldatot a teljesvérmintákhoz.
- A HA-8190V készüléken a hígított hemolizált minta mérhető hemoglobin-koncentrációja 75–225 mg/dL (normál érték: 150 mg/dL).
- Ha a koncentráció nem esik ebbe a tartományba, hibaüzenet keletkezhet, vagy a reprodukálhatóság csökkenhet.
- Ilyen esetben a hígítási arány megfelelő mértékű módosításával módosítsa a koncentrációt, majd ismételje meg a mérést. (A HA-8190V 101-szeresen hígított teljes vérrel dolgozik.)

TÁROLÁS

Felnyitálatlanul: Sötét helyen, közvetlen napfénytől védve, 2°C–30°C-os hőmérsékleten tárolja. Felnyitva: A kupakkal szorosan lezárva, 2°C–8°C-os hőmérsékleten tárolja.

A KÉSZLETBEN BIZTOSÍTOTT TÉTELEK

DILUENT 90: 1 db 250 mL-es palack, felületaktív anyagot tartalmazó foszfátpuffer.

A palack anyagai:

Polietilén (PE) palack. Kupak belső része: PE, külső része: polipropilén (PP).



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Műszaki támogatás elérhetősége
[TEL: +31-20-545-24-50]

