

PocketChem-printer

Handleiding

Bedankt voor uw aankoop van de PocketChem-printer.

Lees deze handleiding grondig door vóór gebruik.

Raadpleeg de handleiding die bij de PocketChem is geleverd voor meer details.

Als u in samenhang met dit hulpmiddel een ernstig incident heeft meegemaakt of als dit had kunnen gebeuren, meld dit dan aan de fabrikant of de geautoriseerde vertegenwoordiger en aan de regelgevende instantie in uw land.

Beoogd doel

PocketChem-printer is een speciaal thermische printer, ontwikkeld voor gebruik met PocketChem BA (PA-4140) en PocketChem UA (PU-4010), bedoeld voor de kwalitatieve, semi-kwantitatieve en/of kwantitatieve meting van meerdere fysiologische markers. Uitsluitend voor *in vitro* diagnostisch en professioneel gebruik. Dit instrument is niet bedoeld voor gebruik bij “near-patient testing”.

Dit product voldoet aan de EMC-norm IEC61326-2-6:2012(EN61326-2-6:2013).

Emissieklasse: CISPR 11 klasse A.

Dit instrument is een medisch instrument voor IVD (In-vitro diagnostiek).



Dit product is in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/746.

OPMERKING: Deze apparatuur is aan tests onderworpen, waarbij is vastgesteld dat het voldoet aan de bepalingen voor digitale toestellen Klasse A, conform onderdeel 15 van de richtlijnen van de Federal Communications Commission (FCC, V.S.). Deze bepalingen zijn zo ontworpen, dat ze een redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur produceert en gebruikt hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de handleiding, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Wanneer deze apparatuur in een woongebied wordt gebruikt, is de kans op schadelijke interferentie aanzienlijk. In een dergelijk geval is de gebruiker verplicht de interferentie voor eigen rekening te verhelpen.

De elektromagnetische omgeving moet voorafgaand aan het gebruik van het instrument worden beoordeeld. Gebruik dit instrument niet in de directe omgeving van bronnen van sterke elektromagnetische straling, omdat die de goede werking kunnen verstoren.



De printer moet rechtstreeks op het instrument worden aangesloten om te kunnen worden gebruikt. Daarom kan ook de printer worden besmet met pathogene micro-organismen. Wees voorzichtig bij het aansluiten, loskoppelen en opbergen van de printer om blootstelling aan pathogene micro-organismen te voorkomen.

Symbolen

De onderstaande symbolen in deze handleiding en de labels op dit instrument worden gebruikt om uw aandacht te trekken naar specifieke zaken.


■ Voor uw veiligheid



Volg de hier gegeven instructies op, ter voorkoming van blootstelling aan pathogene micro-organismen.

Uitpakken

Het pakket zou de hieronder vermelde onderdelen moeten bevatten. Controleer of alles aanwezig is. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met de distributeur.

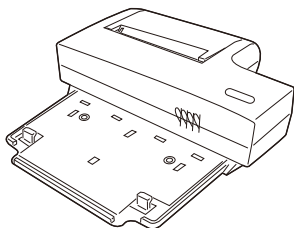

■ PocketChem-printer



■ Styluspen
(opgeslagen in de printer)



■ Printerpapier



■ Handleiding
(deze handleiding)

Vereiste, maar niet geleverde materialen

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Netsnoer
- Netadapter

Printerspecificaties

Printer	Thermische printer
Printerpapier	Thermisch papier met hoge kleurontwikkeling (58 mm (B) × Ø26 mm)
Werkomgeving	Temperatuur: 10 tot 35°C; Vochtigheid: 25-85% RH
Meetomgeving	Temperatuur: 10 tot 35°C; Vochtigheid: 25-85% RH
Opslagomgeving	Temperatuur: 1 tot 35°C; Vochtigheid: 20-85% RH (geen condensatie)
Omgeving tijdens transport	Temperatuur: -10-60°C; Vochtigheid: 20-85% RH (geen condensatie)
Afmetingen	125 (B) × 133 (D) × 36 (H) mm
Gewicht	180 g (zonder printerpapier)
Voeding	Voedingsadapter 7,5 V 3 A
Stroomverbruik	20 W
Bevestiging	One-touch bevestiging
Aansluiting	Contact
Verwachte levensduur	5 jaar vanaf eerste gebruik (installatie) van instrument (volgens bedrijfsgegevens)

Voor gebruik

Volg de onderstaande procedure om de printer aan te sluiten op/los te koppelen van het instrument.

Deze handleiding gebruikt de PocketChem UA (PU-4010) als een voorbeeld.

Raadpleeg de handleiding die bij de PocketChem is geleverd voor meer details.


OPMERKING: Schakel het instrument uit en koppel de voedingsadapter los van het stopcontact voordat u de printer aansluit of loskoppelt. Als u dit niet doet, kunnen het instrument en de printer beschadigd raken. De printer kan onleesbare afdrucken leveren als deze per ongeluk wordt aangesloten of losgekoppeld terwijl het netsnoer nog in het stopcontact zit. Dit betekent echter niet dat er iets mis is met de printer.

■ Wijze van aansluiten

OPMERKING: De printer werkt uitsluitend op netvoeding, niet op batterijen.


Nadat de printer is aangesloten op het instrument, sluit u het instrument via de printer aan op een stopcontact.

1. Plaats het instrument onder een hoek op de printer, zoals aangegeven in de afbeelding.
2. Druk op de bovenkant van het instrument om het vast te klikken.
3. Zorg ervoor dat de bovenkant van het instrument en de printer horizontaal zijn uitgelijnd en dat beide eenheden goed met elkaar zijn verbonden.

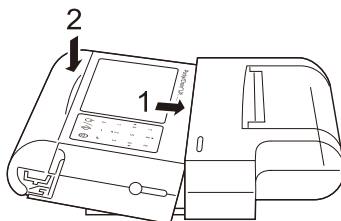

■ Wijze van loskoppelen

1. Plaats het instrument op een vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een bureau).
2. Til, terwijl u op de behuizing boven het display drukt op een punt dat in één lijn ligt met het midden van het display (a), de kap van de leeseenheid op (b).

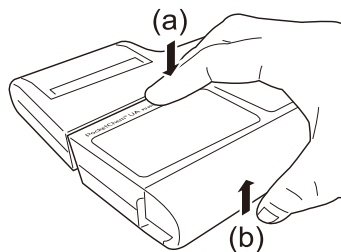

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Neem, als u technische ondersteuning nodig heeft, contact op met ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

