

The Lab 001

Snelle toegangsgids

Inleiding




De snelle toegangsgids geeft een beknopte samenvatting van de monster meting procedure. Zie de bedieningshandleiding en bijsluiter voor meer informatie en lees deze zorgvuldig door vóór gebruik.

Wat voorbereiden

- The Lab 001 ("instrument")
- The Lab 001 A1C HD ("reagenscassette")
- Vingerprikapparaat en lancetten voor bloedbemonstering
- Wegwerphandschoenen



The Lab 001

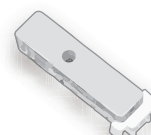


The Lab 001 A1C HD

Procedure voor monstermeting

Step 1

Schakel de stroom in en meld u aan.

1. Zet het apparaat aan.
2. Voer uw operator-ID in druk op  Sign In (is alleen nodig wanneer de operator-ID-functie is ingeschakeld).

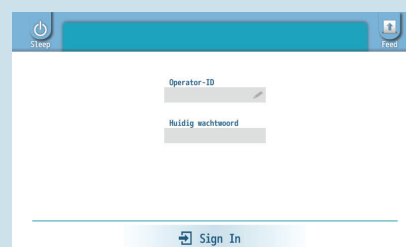

Step 2

Open het monstermetingsscherm.


1. Druk op .
2. Voer de patiëntinformatie in.
3. Druk op .



Step 3

Maak de reagenscassette klaar.


1. Scheur het verpakkingsfolie met de hand aan de rand open en neem de reagenscassette eruit.
2. Verwijder de dop van de cassette.

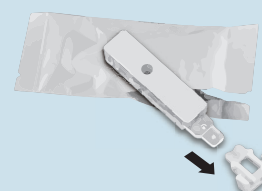

Step 4

Breng monster aan op de reagenscassette.


- Gebruik een van de volgende methoden om het monster op de reagenscassette aan te brengen.
- Breng de vingerprikbloeddruppel in contact met de monstertip van de reagenscassette.
 - Gebruik voor veneus bloed een pipet om monster op de monstertip van de reagenscassette aan te brengen.

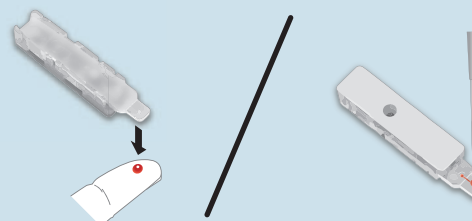

Step 5

Sluit de reagenscassette met de dop.


1. Plaats de dop op de reagenscassette. Druk op de dop tot deze klikt.
2. Controleer of de dop niet loskomt.

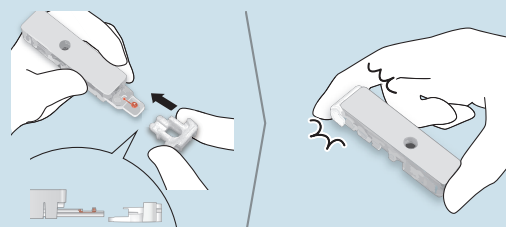

Stap 6

Plaats de reagenscassette en start de meting.

1. Druk op  **Start** om de reagensslede te openen.
2. Houd de reagenscassette met de monstertip naar boven gericht, en plaats de reagenscassette in de reagensslede.
3. Schuif de reagensslede geheel naar binnen.

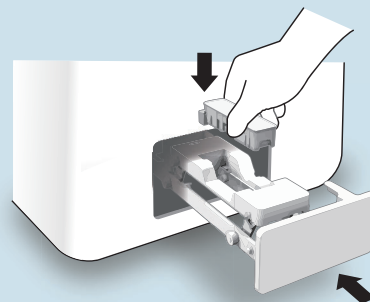

Stap 7


Controleer het meetresultaat.

Na ongeveer 90 seconden is de meting klaar en wordt het meetresultaat getoond.

REFERENTIE

- Voor meer informatie over meetresultaten, zie de bedieningshandleiding.


-  : Druk het resultaat af.
-  : Verzendt het resultaat naar het ziekenhuisinformatiesysteem.
-  : Slaat het resultaat op in een USB-flashdrive.

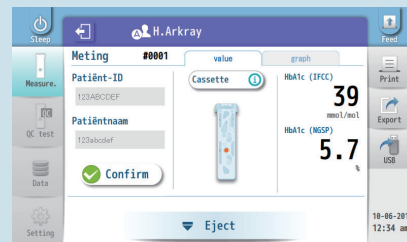

Stap 8

Verwijder de reagenscassette.

1. Druk op  **Eject**.
2. Neem de reagenscassette uit de reagensslede.
3. Schuif de reagensslede geheel naar binnen.

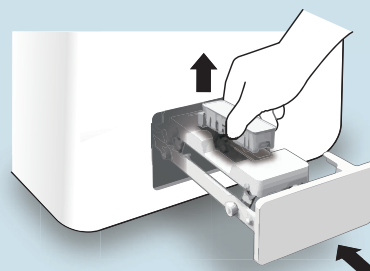

Kwaliteitscontrole

Om het verkrijgen van nauwkeurige meetresultaten te waarborgen, dient u regelmatig een QC-test uit te voeren. De verkregen resultaten van QC-testen dienen het aanvaardbare bereik vallen. Een gedetailleerde beschrijving van de te volgen procedures vindt u in de bijsluiter voor de controles en de bedieningshandleiding voor het instrument.



- Dit instrument gebruikt bloedmonsters. Wees voorzichtig met bloedmonsters aangezien ze geïnfecteerd kunnen zijn met HIV, HBV, HCV of andere virussen. Draag wegwerphandschoenen wanneer u monsters meet.
- Raak de reagensslede of andere onderdelen waar monsters aan kan kleven, nooit aan zonder wegwerphandschoenen. Draag wegwerphandschoenen ter voorkoming van blootstelling aan pathogene micro-organismen.



Als er een waarschuwing wordt gegeven of er een fout of probleem optreedt, zie dan de bedieningshandleiding om het probleem op te lossen.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Neem, als u technische ondersteuning nodig heeft, contact op met ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59