

Cuvette (heparin)

Prije uporabe pročitajte priručnik za uporabu instrumenta. Ako ste imali ili ste mogli imati bilo kakav ozbiljan incident povezan s uređajem, prijavite ga izravno proizvođaču ili putem ovlaštenog zastupnika i lokalnom regulatornom tijelu.

Namjena

Cuvette (heparin) je namjenski spremnik za uzorke pune krvi predviđen za uporabu uz SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), SpotChem D-Concept 2e (SD-4840) i SpotChem EL 2 (SE-1530), koji su namijenjeni za kvantitativno mjerenje nekoliko fizioloških markera. Samo za *in vitro* dijagnostičku i profesionalnu uporabu.

Upozorenja i mjere opreza


- Samo za *in vitro* dijagnostičku uporabu.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju kliničkim uzorcima i analitičkim alatima. Pravilno odložite biološki opasan otpad. Trebate li detaljne upute, pogledajte priručnik za uporabu instrumenta.
- Nemojte ponovno upotrebljavati.

Opis proizvoda

Ova epruveta za uzorke sadržava heparin kao antikoagulans i upotrebljava se s punom krvi i za odvajanje plazme.

Upute

- Ulijte 530 µL svježe prikupljene pune krvi u epruvetu za uzorke.
- Čvrsto zatvorite i pažljivo okrenite 5 do 6 puta kako biste pomiješali uzorak.
- Prilikom mjerenja uzoraka pune krvi (elektroliti): Uklonite čep i odmah mjerite.
- Prilikom mjerenja uzoraka plazme (biokemija): Nakon centrifugiranja uklonite čep i odmah mjerite.

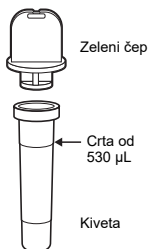

Upozorenja

- Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, poput jednokratnih rukavica, prije rukovanja uzorcima.
- Pažljivo otvorite čep, pazite da ne raspršite kristale koji prekrivaju unutarnju površinu epruvete za uzorke. To je litijev heparin koji služi kao antikoagulans.
- Nemojte upotrebljavati epruvete za uzorke koje nisu zatvorene čepom. Nemojte upotrebljavati epruvetu za uzorke ako je oštećen zeleni čep ili kiveta.
- Pohranite na tamnom mjestu izbjegavajući vlagu i izravnu sunčevu svjetlost.
- Epruveta za uzorke nije sterilizirana.
- Epruveta za uzorke nije namijenjena za pohranu uzoraka.
- Nemojte upotrebljavati ovu epruvetu za uzorke za mjerenje pune krvi prikupljene u epruvetama koje sadržavaju antikoagulans.
- Prilikom mjerenja elektrolita (Na, K, Cl), nemojte centrifugirati; mjerite s punom krvi. Mjerenje centrifugirane plazme može rezultirati niskim vrijednostima za K i Na te visokim vrijednostima za Cl.

Pohrana i stabilnost

Pohranite na temperaturi od 2 do 30 °C (od 36 do 86 °F) Epruvete za uzorke mogu se upotrebljavati do isteka roka trajanja navedenog na pakiranju.

Priloženi materijali

Sljedeće stavke priložene su u sljedećim količinama.

- Cuvette (heparin): 500 kom.
500 kiveta
500 zeleni čep
- Cuvette (heparin): 100 kom.
100 kiveta
100 zeleni čep

Potrebni materijali koji nisu priloženi

Mjerenje zahtijeva i ostale potrošne materijale. Detalje potražite u priručniku za uporabu instrumenta.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Ako vam je potrebna tehnička podrška, obratite se tvrtki ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

