

Cuvette (heparin)

Lea el manual de instrucciones del instrumento antes de usarlo. Si ha tenido o puede haber tenido algún incidente grave relacionado con el dispositivo, notifíquelo directamente al fabricante o a través del representante autorizado y a su autoridad reguladora local.

Finalidad prevista

- + La Cuvette (heparin) es un recipiente específico para muestras de sangre total que se utiliza con los sistemas SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830) y SpotChem D-Concept 2e (SD-4840), destinados a la medición cuantitativa de varios marcadores fisiológicos. Solo para diagnóstico *in vitro* y uso profesional.

Advertencias y precauciones


- Solo para uso en diagnóstico *in vitro*.
- Tenga mucho cuidado al manipular las muestras clínicas y las herramientas analíticas. Elimine adecuadamente los residuos con riesgo biológico. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones del instrumento.
- No reutilizar.

Descripción del producto

Este tubo de muestra contiene heparina como anticoagulante y se utiliza con sangre entera y para la separación de plasma.

Instrucciones

- 1) Vierta 530 µL de sangre entera recién recogida en el tubo de muestra.
- 2) Tápelo bien e inviértalo suavemente de 5 a 6 veces para mezclar.
- 3) Si se analizan muestras de sangre entera (electrolitos): Retire el tapón y realice el análisis de inmediato.
- 4) Si se analizan muestras de plasma (bioquímica): Después de la centrifugación, retire el tapón y realice el análisis de inmediato.

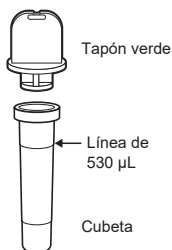

Precauciones

- 1) Utilice un equipo de protección adecuado, como guantes desechables, antes de manipular las muestras.
- 2) Abra suavemente el tapón procurando no dispersar los cristales que recubren la superficie interior del tubo de muestra. Se trata de heparina de litio utilizada como anticoagulante.
- 3) No utilice tubos de muestra sin tapón. No utilice el tubo de muestra si el tapón verde o la cubeta están dañados.
- 4) Guárdese en un lugar oscuro, evitando la humedad y la luz solar directa.
- 5) El tubo de muestra no está esterilizado.
- 6) El tubo de muestra no está pensado para el almacenamiento de especímenes.
- 7) No utilice este tubo de muestra para analizar sangre entera recogida en tubos de muestra que contengan anticoagulante.
- 8) Si se analizan electrolitos (Na, K, Cl), no centrifugar; analizar con sangre entera. El análisis de plasma centrifugado puede tener como resultado valores bajos de K y Na, y valores altos de Cl.

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar a 2 - 30°C (36 - 86°F)

Los tubos de muestra pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Materiales proporcionados

Los siguientes elementos se suministran en las siguientes cantidades.

- Cuvette (heparin): 500 ud.
500 cubetas
500 tapones verdes
- Cuvette (heparin): 100 ud.
100 cubetas
100 tapones verdes

Materiales requeridos pero no suministrados

La medición también requiere otros consumibles. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del instrumento.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Si necesita obtener asistencia técnica,
contacte con ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

