

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Lea el manual de instrucciones del instrumento antes de usarlo. Si ha tenido o puede haber tenido algún incidente grave relacionado con el dispositivo, notifíquelo directamente al fabricante o a través del representante autorizado y a su autoridad reguladora local.

Finalidad prevista

El Centrifuge Cup (for D-Concept) es un recipiente específico para muestras de sangre total que se utiliza con el sistema SPOTCHEM D-Concept (SD-4820), destinado a la medición cuantitativa de varios marcadores fisiológicos. Solo para diagnóstico *in vitro* y uso profesional.

Advertencias y precauciones


- Solo para uso en diagnóstico *in vitro*.
- Tenga mucho cuidado al manipular las muestras clínicas y las herramientas analíticas. Elimine adecuadamente los residuos con riesgo biológico. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones del instrumento.
- No reutilizar.

Descripción del producto

Este tubo de muestra contiene heparina como anticoagulante y se utiliza para separar el plasma de la sangre entera.

Instrucciones

- 1) Vierta 495 μ L - 565 μ L de sangre entera recién recogida en el tubo de muestra.
- 2) Tápelos bien e invértalo suavemente de 5 a 6 veces para mezclar.
- 3) Retire el tapón y coloque de inmediato el tubo de muestra en la centrifuga interna del instrumento para el análisis.

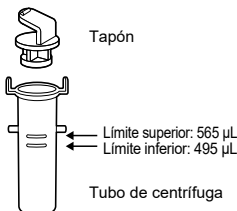

Precauciones

- 1) Utilice un equipo de protección adecuado, como guantes desechables, antes de manipular las muestras.
- 2) Abra suavemente el tapón procurando no dispersar los cristales que recubren la superficie interior del tubo de muestra. Se trata de heparina de litio utilizada como anticoagulante.
- 3) No utilice tubos de muestra sin tapón. No utilice el tubo de muestra si el tapón o el tubo de centrifuga están dañados.
- 4) Guárdese en un lugar oscuro, evitando la humedad y la luz solar directa.
- 5) El tubo de muestra no está esterilizado.
- 6) El tubo de muestra no está pensado para el almacenamiento de especímenes.
- 7) No utilice este tubo de muestra para analizar sangre entera recogida en tubos de muestra que contengan anticoagulante.

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar a 2 - 30°C (36 - 86°F)

Los tubos de muestra pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Materiales proporcionados

Los siguientes elementos se suministran en las siguientes cantidades.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 uds.
100 tubos de centrifuga
100 tapones

Materiales requeridos pero no suministrados

La medición también requiere otros consumibles. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del instrumento.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Si necesita obtener asistencia técnica,
contacte con ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

