

Whole Blood Sample Tube

Lea el manual de instrucciones del instrumento antes de usarlo. Si ha tenido o puede haber tenido algún incidente grave relacionado con el dispositivo, notifíquelo directamente al fabricante o a través del representante autorizado y a su autoridad reguladora local.

Finalidad prevista

El Whole Blood Sample Tube es un recipiente específico para muestras de sangre total que se utiliza con los sistemas SPOTCHEM EZ (SP-4430) y SPOTCHEM EL (SE-1520), destinados a la medición cuantitativa de varios marcadores fisiológicos. Solo para diagnóstico *in vitro* y uso profesional.

Advertencias y precauciones

- Solo para uso en diagnóstico *in vitro*.
- Tenga mucho cuidado al manipular las muestras clínicas y las herramientas analíticas. Elimine adecuadamente los residuos con riesgo biológico. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones del instrumento.
- No reutilizar.

Descripción del producto

Este tubo de muestra contiene heparina como anticoagulante y se utiliza con sangre entera y para la separación de plasma.


Instrucciones

- Al analizar muestras de plasma (bioquímica para SPOTCHEM EZ)

1. Vierta 250 - 500 µL de sangre entera recién recogida en el tubo de muestra.
2. Tápele bien e inviértalo suavemente de 5 a 6 veces para mezclar.
3. Después de la centrifugación, retire el tapón y realice el análisis de inmediato.

- Al analizar muestras de sangre total (electrolitos para SPOTCHEM EL)

1. Vierta 500 µL de sangre entera recién recogida en el tubo de muestra.
2. Tápele bien e inviértalo suavemente de 5 a 6 veces para mezclar.
3. Retire el tapón y realice el análisis de inmediato.

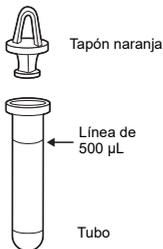

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar a 2 - 30°C (36 - 86°F)

Los tubos de muestra pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Materiales proporcionados

Los siguientes elementos se suministran en las siguientes cantidades.

- Whole Blood Sample Tube: 500 uds.
500 tubos
500 tapones naranjas
- Whole Blood Sample Tube: 100 uds.
100 tubos
100 tapones naranjas

Materiales requeridos pero no suministrados

La medición también requiere otros consumibles. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del instrumento.

Precauciones

1. Utilice un equipo de protección adecuado, como guantes desechables, antes de manipular las muestras.
2. Abra suavemente el tapón procurando no dispersar los cristales que recubren la superficie interior del tubo de muestra. Se trata de heparina de litio utilizada como anticoagulante.
3. No utilice tubos de muestra sin tapón. No utilice el tubo de muestra si el tapón naranja o el tubo están dañados.
4. Guárdese en un lugar oscuro, evitando la humedad y la luz solar directa.
5. El tubo de muestra no está esterilizado.
6. El tubo de muestra no está pensado para el almacenamiento de especímenes.
7. No utilice este tubo de muestra para analizar sangre entera recogida en tubos de muestra que contengan anticoagulante.
8. Si se analizan electrolitos (Na, K, Cl), no centrifugar; analizar con sangre entera. El análisis de plasma centrifugado puede tener como resultado valores bajos de K y Na, y valores altos de Cl.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Si necesita obtener asistencia técnica,
contacte con ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

