

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Prije uporabe pročitajte priručnik za uporabu instrumenta. Ako ste imali ili ste mogli imati bilo kakav ozbiljan incident povezan s uređajem, prijavite ga izravno proizvođaču ili putem ovlaštenog zastupnika i lokalnom regulatornom tijelu.

Namjena

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) je namjenski spremnik za uzorke pune krvi za uporabu sa SPOTCHEM EZ (SP-4430) koji je namijenjen za kvantitativno mjerenje niza fizioloških biljega. Samo za *in vitro* dijagnostičku i profesionalnu uporabu.

Upozorenja i mjere opreza


- Samo za *in vitro* dijagnostičku uporabu.
- Poduzmite posebne mjere opreza pri rukovanju s kliničkim uzorcima i analitičkim alatima. Odložite u otpad u skladu s propisima o biološkoj opasnosti. Detaljne upute potražite u priručnik za uporabu instrumenta.
- Nemojte ponovo upotrebljavati.

Opis proizvoda

Ova epruveta za uzorke sadrži heparin kao antikoagulans i upotrebljava se za odvajanje plazme od pune krvi.

Upute

1. Ulijte 250 µl svježe prikupljene pune krvi u epruvetu za uzorak.
2. Čvrsto pritegnite čep i lagano prevrnite epruvetu 5 - 6 puta kako biste je promiješali.
3. Uklonite čep i odmah postavite epruvetu s uzorkom u internu centrifugu instrumenta radi mjerenja.

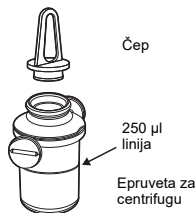

Mjere opreza

1. Prije rukovanja uzorcima nosite zaštitnu opremu kao što su jednokratne rukavice.
2. Lagano odvrnite čep vodeći računa da se ne rasprše kristali kojima je obložena unutarnja površina epruvete. Riječ je o heparinu litija koji se upotrebljava kao antikoagulans.
3. Nemojte upotrebljavati epruvete za uzorak koje nemaju čep. Nemojte upotrebljavati epruvetu za uzorak ako su čep ili epruveta za centrifugu oštećeni.
4. Držite na tamnom mjestu kako biste izbjegli vlagu i izravnu sunčevu svjetlost.
5. Epruveta za uzorak nije sterilizirana.
6. Epruveta za uzorak nije namijenjena za pohranu uzoraka.
7. Nemojte upotrebljavati ovu epruvetu za uzorak kako biste izmjerili cijelu krv prikupljenu u epruvetama za uzorke koje sadrže antikoagulanse različite od heparina.

Pohrana i stabilnost

Čuvati na temperaturi od 2 - 30°C (36 - 86°F)
Epruvete za uzorak mogu se upotrebljavati do datuma isteka roka uporabe navedenog na pakiranju.

Isporučeni materijali

- Sljedeće stavke su isporučene u sljedećim količinama.
- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 kom
 - 100 epruveta za centrifugu
 - 100 čepova

Potrebni materijali koji nisu isporučeni

Za mjerenja je potreban i drugi potrošni materijali koji nije isporučen. Detalje potražite u priručnik za uporabu instrumenta.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Ako vam je potrebna tehnička podrška, obratite

se tvrtki ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

