

AUTION EYE Sheath Solution

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a termékismertetőt.

Ha az eszköz használatával kapcsolatban súlyos esemény következett be, vagy fennállt ennek a lehetősége, kérjük, ezt jelentse közvetlenül vagy a hivatalos képviselőten keresztül a gyártónak, valamint a helyi szabályozó hatóságnak.

Javallat

Az AUTION EYE Sheath Solution az AI-4510 modellszámú termékkel való használatra szánt bevonó oldat. Utóbbi számos fiziológiai marker kvantitatív vagy félkvantitatív mérésére szolgál a vizeletben. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai, illetve szakemberek általi használatra.

Működés elve

Az AUTION EYE Sheath Solution a törésmutató és a pH-szint szabályozására szolgáló oldat.

Összetétel

AUTION EYE Sheath Solution
Pufferoldat és tartósítószer

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Soha ne használja embereken.
- A jelen tájékoztatóban ismertetett céloktól eltérő felhasználás, illetve módszerek alkalmazása esetén a termék teljesítménye nem garantált.
- Használat előtt olvassa el alaposan az adott berendezéshez tartozó AI-4510 kezelési útmutatót.

<Kezelési óvintézkedések>

- Kizárólag szakemberek használhatják.
- Az AUTION EYE Sheath Solution oldaton vagy azzal végzett munka esetén mindig viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést. Soha ne érintkezzen közvetlenül a reagenssel. A szem, a bőr vagy a nyálkahártya irritációját okozhatja.
- Felnyitáskor vigyázzon, hogy az oldat ne fröccsenjen ki.
- Ha a reagens véletlenül a bőrre kerülne, bő vízzel azonnal mossa le a felületet.
- Ha az oldat szembe kerül, öblítse ki haladéktalanul bő vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget.

<A használatra vonatkozó óvintézkedések>

- A lejárat dátumot követően ne használja az AUTION EYE Sheath Solution terméket.
- A nedvesség elpárolgása esetén a reagens koncentrációja megnőhet. Tárolás esetén szorosan helyezze vissza a kupakot. A helytelen tárolás csökkentheti a termék teljesítményét.
- Biztosítsa, hogy a felnyitást követően ne kerülhessenek szennyeződések vagy mikrobák a reagensbe.
- A reagens teljes mennyiségét használja fel. Ne keverje össze az oldatot más dobozokban lévő reagensekkel, még akkor sem, ha azok ugyanazzal a tétele számmal rendelkeznek.

Az eljárás menete

- Tekintse meg az AI-4510 kezelési útmutatójában a vizelet AUTION EYE Sheath Solution eszközzel végzett elemzéséhez kapcsolódó utasításokat.
- A reagens felhasználását követően dobja ki a dobozt. Ne használja fel újra a dobozt.

Tárolás és stabilitás

- Tárolás
Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Tárolja a terméket a dobozban 2 és 35 °C közötti hőmérsékleten. (Ne fagyassza le.)
- Lejárat dátuma
A lejárat dátuma a csomagolódoboz címkéjén van feltüntetve.
- Felhasználhatóság a felnyitást követően
Használja fel a reagenst a felnyitást követő 30 napon belül.

Teljesítményjellemzők és a módszer korlátai

- Az AUTION EYE Sheath Solution kizárólag megadott berendezésekkel és reagensekkel használható. Ne használja más rendszerekkel.
- Ne használja az AI-4510 specifikációi szerinti mintaelemzéstől eltérő célokra.

Ártalmatlanítás

Az AUTION EYE Sheath Solution nem tartalmaz biológiai veszélyt jelentő anyagokat. A dobozt a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően dobja ki.

Termékadatok

Mellékelt anyagok

AUTION EYE Sheath Solution
10 l / doboz

Szükséges, de nem mellékelt anyagok

Tekintse meg az AUTION EYE AI-4510 kezelési útmutatóját.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Műszaki támogatás elérhetősége

[TEL: +31-20-545-24-50]

Kibocsátva: 2022.01.06