

AUTION EYE Sheath Solution

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
Če je prišlo ali bi lahko prišlo do resnega zapleta, povezanega s pripomočkom, o tem obvestite neposredno proizvajalca ali prek pooblaščenega zastopnika in lokalni regulativni organ.

Predviden namen

AUTION EYE Sheath Solution je raztopina ovojnice za uporabo z AI-4510, ki je namenjena kvantitativnemu in polkvantitativnemu merjenju več fizioloških markerjev v urinu. Samo za *in vitro* diagnostično in profesionalno uporabo.

Metodologija

AUTION EYE Sheath Solution je raztopina za uravnavanje refraktivnega indeksa in pH vrednosti.

Sestava

AUTION EYE Sheath Solution
Pufer in konzervans

Opozorila in previdnostni ukrepi

1. Nikoli ne uporabljajte na človeškem telesu.
2. Učinkovitosti ni mogoče zagotoviti, če se uporablja za namene ali za druge načine, ki niso navedeni v teh navodilih za uporabo.
3. Pred uporabo natančno preberite uporabniški priročnik za AI-4510 in navodila za uporabo namenskega instrumenta.

<Previdnostni ukrepi za ravnanje>

1. Samo za profesionalno uporabo.
2. Pri izvajanju del na ali z raztopino AUTION EYE Sheath Solution vedno nosite osebno varovalno opremo. Izogibajte se neposrednemu telesnemu stiku z reagentom. Lahko povzroči draženje oči, kože in sluznic.
3. Pazite, da raztopine med odpiranjem ne razlijete.
4. Če nenamerno pridete v stik z reagentom, kožo takoj sperite z veliko količino vode.
5. Če raztopina pride v oko, takoj sperite z veliko vode. Nemudoma se posvetujte z zdravnikom.
6. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč.

<Previdnostni ukrepi za uporabo>

1. Raztopine AUTION EYE Sheath Solution ne uporabljajte po pretečenem roku uporabnosti.
2. Izhlapevanje vlage lahko poveča koncentracijo reagenta. Pred shranjevanjem tesno zaprite pokrov. Nepravilno shranjevanje lahko poslabša specifične lastnosti.
3. Po odpiranju preprečite vdor mikrobov ali prahu.
4. Reagent iz vsebnika porabite do konca. Raztopine ne mešajte z reagentom iz drugega vsebnika, tudi če imata enako številko serije.

Postopek

1. Za navodila za analizo urina z uporabo raztopine AUTION EYE Sheath Solution glejte uporabniški priročnik za AI-4510.
2. Po porabi reagenta zavrzite vsebnik. Vsebnika ne smete ponovno uporabiti.

Shranjevanje in stabilnost

1. Shranjevanje
Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Izdelek shranjujte v hladilniku pri temperaturah med 2 in 35 °C. (Ne zamrzujte.)
2. Rok uporabnosti
Rok uporabe je natisnjen na etiketi na škatli.
3. Obdobje veljavnosti po odpiranju
Reagent uporabite v 30 dneh po odprtju.

Značilnosti delovanja in omejitve metode

1. Raztopina AUTION EYE Sheath Solution je namenjena izključno uporabi z določenim instrumentom in reagenti. Ne uporabljajte z drugimi sistemi.
2. Ne uporabljajte za druge namene kot za analizo vzorca v skladu s specifikacijami AI-4510.

Postopek odstranjevanja

Raztopina AUTION EYE Sheath Solution ne vsebuje nobenih biološko nevarnih snovi. Vsebnik zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Informacije o izdelku

Priloženi materiali

AUTION EYE Sheath Solution
10 l/škatla

Potrebni materiali, ki niso priloženi

Glejte uporabniški priročnik za AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Obrnite se na tehnično pomoč
[TEL: +31-20-545-24-50]