

AUTION EYE Sheath Solution

Enne toote kasutamist lugege see pakendi infoleht hoolikalt läbi.
Kui teil oli või võis juhtuda seadmega seotud tõsine juhtum, siis palun teatage sellest otse või volitatud esindaja kaudu tootjale ning kohalikule reguleerivale asutusele.

Kavandatud kasutus

AUTION EYE Sheath Solution on analüsaatoriga AI-4510 koos kasutatav ümbrislahus, mis on mõeldud mitme füsioloogilise markeri kvantitatiivseks ja poolkvantitatiivseks mõõtmiseks uriinist. Mõeldud vaid *in vitro* diagnostiliseks ja professionaalseks kasutamiseks.

Metoodika

AUTION EYE Sheath Solution on mürdumisinäitaja ja pH taseme reguleerimise lahus.

Koostis

AUTION EYE Sheath Solution
Puhver ja säilitusaine

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

1. Ärge mitte kunagi kasutage seda inimkehal.
 2. Lahuse toime ei ole tagatud, kui seda kasutatakse selles pakendi infolehes nimetatata eesmärkidel või meetodites.
 3. Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi eriotstarbelise seadme AI-4510 kasutusjuhend.
- <Ettevaatusabinõud käsitlemisel>**
1. Ainult professionaalseks kasutamiseks.
 2. Kandke alati isikukaitsevahendeid, kui töötate lahusega AUTION EYE Sheath Solution või seda kasutades. Vältige otsest kokkupuudet reaktiiviga. See võib põhjustada silmade, naha ja limaskestade ärritust.
 3. Avage lahuse mahuti ettevaatlikult, vältides lahuse pritsimist.
 4. Reaktiiviga kogemata kokku puutudes loputage nahka viivitamata rohke veega.
 5. Kui lahus satub silma, loputage viivitamatult rohke veega. Võtke kohe ühendust arstiga.
 6. Allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole.

<Ettevaatusabinõud kasutamisel>

1. Ärge kasutage lahust AUTION EYE Sheath Solution pärast selle kõlblikkusaja lõppu.
2. Niiskuse aurustumine võib suurendada reaktiivi kontsentratsiooni. Sulgege kork hoiustamise ajaks korralikult. Valesi hoiustamine võib halvendada toote toimet.
3. Vältige pärast avamist mikroobide või tolmu lahusesse pääsemist.
4. Kasutage kogu mahutis olev reaktiiv ära. Ärge segage lahust teisest mahutist pärit reaktiiviga isegi juhul, kui neil on sama partii number.

Protseduur

1. Lugege lahusega AUTION EYE Sheath Solution uriini analüüsimise juhiseid analüsaatori AI-4510 kasutusjuhendist.
2. Pärast reaktiivi lõpuni kasutamist visake mahuti ära. Mahuti on ühekordseks kasutamiseks.

Hoiustamine ja stabiilsus

1. Hoiustamine
Hoida eemal otsese päikesevalguse eest. Hoidke toodet karbis temperatuuril 2–35 °C. (Mitte külmutada.)
2. Kõlblikkusaeg
Kõlblikkusaeg on trükitud karbi etiketile.
3. Kõlblikkusaeg pärast avamist
Kasutage reaktiivi 30 päeva jooksul pärast avamist.

Meetodi tulemuslikkuse näitajad ja piirangud

1. AUTION EYE Sheath Solution on ette nähtud kasutamiseks ainult koos konkreetse seadme ja reaktiividega. Ärge kasutage seda teiste süsteemidega.
2. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel peale analüsaatori AI-4510 spetsifikatsiooni järgi proovide analüüsimise.

Kasutuselt kõrvaldamine

AUTION EYE Sheath Solution ei sisalda biohtlikke aineid. Kõrvaldage mahuti kasutuselt kehtivate kohalike õigusaktide alusel.

Tooteteave

Kaasasolevad materjalid

AUTION EYE Sheath Solution
10 l karbis

Nõutavad materjalid, mida pole kaasas

Vaadake AUTION EYE AI-4510 kasutusjuhendit.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Tehnilise abi saamiseks pöörduge

[TEL: +31-20-545-24-50]

Valja antud: 2022.01.06