

AUTION EYE Sheath Solution

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.

Jos sinulla on ollut tai olisi voinut olla laitteeseen liittyvä vakava vaaratilanne, ilmoita siitä suoraan valmistajalle tai valtuutetun edustajan kautta ja paikalliselle sääntelyviranomaiselle.

Käyttötarkoitus

AUTION EYE Sheath Solution on AI-4510-laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettu suojaliuos. AI-4510 on tarkoitettu useiden fysiologisten merkkiaineiden kvantitatiiviseen ja puolikvantitatiiviseen mittaamiseen virtsasta. Vain *in vitro* -diagnostiikkaan ja ammattikäyttöön.

Menetelmä

AUTION EYE Sheath Solution -liuosta käytetään taitekertoimen ja pH-tason säätelyyn.

Koostumus

AUTION EYE Sheath Solution

Puskuri ja säilöntäaine

Varoitukset ja varotoimet

- Sitä ei saa koskaan käyttää ihmiskehoon.
- Suorituskykyä ei voida taata, jos sitä käytetään muihin kuin tässä pakkausselosteessa mainittuihin tarkoituksiin tai menetelmiin.
- Lue kyseisen AI-4510-laitteen käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

<Käsittelyohjeet>

- Vain ammattikäyttöön.
- Käytä aina henkilönsuojaimia, kun työskentelet AUTION EYE Sheath Solution -liuoksen parissa. Vältä suoraa kehokosketusta reagenssiin. Se voi ärsyttää silmiä, ihoa ja limakalvoja.
- Varo, ettei liuosta roisku pakkausta avattaessa.
- Jos joudut tahattomasti kosketuksiin reagenssin kanssa, huuhtelee iho välittömästi runsaalla vedellä.
- Jos liuosta joutuu silmään, huuhtelee silmä välittömästi runsaalla vedellä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

<Käyttöön liittyvät varotoimet>

- Älä käytä AUTION EYE Sheath Solution -liuosta viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Kosteuden haihtuminen voi suurentaa reagenssin pitoisuutta. Sulje korkki huolellisesti säilytystä varten. Virheellinen säilytys voi heikentää määritettyä suorituskykyä.
- Vältä mikrobien ja polyn kertymistä avaamisen jälkeen.
- Käytä kaikki säiliön sisältämä reagenssi. Älä sekoita liuosta toisen säiliön reagenssiin, vaikka niissä olisi sama eränumero.

Menettely

- Katso AI-4510-laitteen käyttöoppaasta ohjeet virtsan analysointiin AUTION EYE Sheath Solution -liuoksella.
- Hävitä säiliö reagenssin käytön jälkeen. Säiliö on kertakäyttöinen.

Säilytys ja säilyvyys

- Säilytys
Ei saa altistaa suoralle auringonvalolle. Säilytä tuotetta laatikossa 2–35 °C:n lämpötilassa. (Ei saa pakastaa.)
- Viimeinen käyttöpäivä
Viimeinen käyttöpäivä on merkitty laatikon etikettiin.
- Käytettävyyssika avaamisen jälkeen
Käytä reagenssi 30 päivän kuluessa avaamisesta.

Menetelmän toiminnalliset ominaisuudet ja rajoitukset

- AUTION EYE Sheath Solution -liuos on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritetyn laitteen ja määritettyjen reagenssien kanssa. Sitä ei saa käyttää muiden järjestelmien kanssa.
- Liuosta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin näytteiden analysointiin AI-4510-laitteen määritysten mukaisesti.

Hävittäminen

AUTION EYE Sheath Solution -liuos ei sisällä mitään biovaarallisia aineita. Hävitä säiliö sovellettavien paikallisten määräysten mukaisesti.

Tuotetiedot

Mukana toimitettavat materiaalit

AUTION EYE Sheath Solution

10 l / laatikko

Tarvittavat materiaalit, joita ei toimiteta

Katso lisätietoja AUTION EYE AI-4510 -laitteen käyttöoppaasta.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Teknisen tuen yhteystiedot

[TEL: +31-20-545-24-50]

Julkaistu: 2022.01.06