

Concentrated Washing Solution 3

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute u pakiranju. Čuvajte ih pri ruci kao referencu prema potrebi.
Ako ste imali ili ako ste mogli imati bilo kakav ozbiljan incident povezan s uređajem, prijavite ga izravno proizvođaču ili putem ovlaštenog predstavnika i svom lokalnom regulatornom tijelu.

Namjena

Concentrated Washing Solution 3 je otopina za pranje namijenjena za uporabu s uređajima AX-4060 ili AI-4510, koji su namijenjeni za kvalitativno, polukvantitativno i/ili kvantitativno mjerenje nekoliko fizioloških biljega u urinu.

Isključivo za *in vitro* dijagnostičku i profesionalnu uporabu.

Sastav

Tribazni natrijev fosfat, 0,2% (CAS br. 7601-54-9)

Polioksietilen alkil(12-14)eteri, 1% (CAS br. 84133-50-6)

Uporaba

Razrijedite koncentriranu otopinu deioniziranom vodom u omjeru 1:9 za uporabu (1 dio koncentrirane otopine razrijeđen s 9 dijelova deionizirane vode).

Prije uporabe pažljivo pročitajte priručnik za uporabu analizatora.

Oprez

1. Nakon razrjeđivanja, gljivice i/ili bakterije mogu rasti u otopini. Razrijeđenu otopinu za pranje upotrijebite unutar 15 dana od razrjeđivanja.
2. Otopinu za pranje upotrijebite unutar roka valjanosti. Ako skladištenje nije prikladno, dovoljne performanse se ne održavaju iako je otopina unutar roka valjanosti.
3. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost tijekom skladištenja.
4. U slučaju kontakta s očima, odmah i temeljito isperite vodom iz slavine. Po potrebi se obratite liječniku.
5. Ovaj je proizvod alkalna otopina za pranje. NEMOJTE piti. Prije uporabe obucite zaštitne rukavice radi sigurnosti.

Zbrinjavanje biološki opasnog otpada

Tekući otpad zbrinjavajte u skladu s vašim propisima o biološki opasnom otpadu.

Skladištenje i stabilnost

1. Skladištenje
Skladištiti na sobnoj temperaturi (1 – 30 °C).
2. Rok valjanosti
Otisnut na naljepnici boce i vanjskom spremniku.

Isporučeni materijali

Concentrated Washing Solution 3 1 L × 5 boca

Potrebni materijali koji nisu isporučeni

Epruveta s uzorkom (kada se koristi s uređajem AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontaktirajte tehničku podršku
[TEL: +31-20-545-24-50]

